

Anleitung zur Aufbereitung der Spendersysteme:

ingo-man[®] plus Touchless

ingo-man[®] plus Weco Touchless

auf Basis der KRINKO-Empfehlung zur Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens.¹



Für die vollständige Aufbereitung der Spendersysteme sind mehrere Schritte zu durchlaufen, die in dem folgenden Dokument näher beschrieben werden und sich wie folgt gliedern lassen:

- Vorbereitende Maßnahmen und Demontage
- Maßnahmen zur Reinigung
- Maßnahmen zur Desinfektion und Montage
- Aufbereitungsturnus und zusätzliche Maßnahmen

¹ Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz* 2016, 59(9):1189-1220.

Vorbereitende Maßnahmen und Demontage

- Zum Personalschutz sind bei der Aufbereitung von Spendern und Pumpen Handschuhe zu tragen - gemäß der Indikation „Kontakt mit potentiell infektiösen Materialien“.



- Auslaufblende anheben: So wird vermieden, dass der Spender während der Aufbereitung aktiviert wird.



- Entnahme des Gebindes aus dem Spender durch leichtes An- und Herausheben des Gebindes.



- Frontentnahme der Pumpe aus dem Spender – beachten Sie: zur Entnahme der Pumpe die Entriegelungstaste nach unten drücken.




- Spendergehäuse von der Rückwand abnehmen: Mit einem stabilen, dünnen Gegenstand (z.B. Schraubendreher) durch die Demontageöffnung in der vorderen Spenderwand die Zunge an der Montageplatte andrücken. Bei gedrückter Zunge den Spender nach oben von der Montageplatte abziehen.



Maßnahmen zur Reinigung

- Abwischen des Steigrohrs der Pumpe mit einem Einmalpapiertuch zur Entfernung von Produktresten.

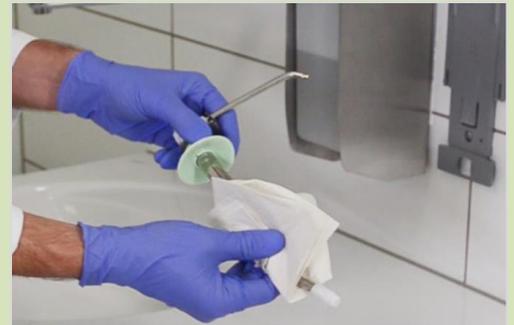

- Reinigung der Pumpe unter fließendem heißem Wasser mit besonderem Fokus auf den Auslauf – die Silikonmembran der Pumpe kann zu diesem Zweck abgenommen und ebenfalls gereinigt werden.



- Alternativ: Pumpen die zur Dosierung von Handwaschpräparaten (Seifen) verwendet wurden, zusätzlich mit heißem Wasser durchspülen.




- Trocknung der gereinigten Pumpe auf einem sauberen Einmalpapiertuch.



Maßnahmen zur Desinfektion und Montage

- Wischdesinfektion der Spenderrückwand mit einem geeigneten Flächendesinfektionsmittel.
- Wischdesinfektion der Pumpe mit einem geeigneten Flächendesinfektionsmittel.
- Wischdesinfektion des Spendergehäuses mit einem geeigneten Flächendesinfektionsmittel.
- Anbringung des Spendergehäuses an die Spenderrückwand – dazu das Gehäuse von oben auf die Rückwand aufschieben, sodass das Gerät fest einrastet.

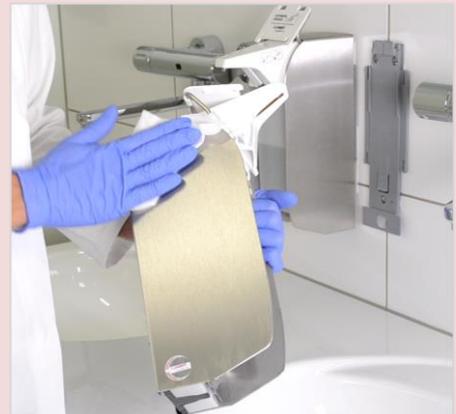

Maßnahmen zur Desinfektion und Montage

- Einsetzen der Pumpe in das Spendergehäuse.
- Einsetzen eines neuen Händedesinfektionsmittelgebundes.
- Auslaufblende herunterklappen und den Spender einige Male auslösen, um das Desinfektionsmittel anzupumpen. Fangen Sie die gependete Flüssigkeit in einem geeigneten Behälter auf (z.B. Messbecher).
- Alternativ: Spender die zur Dosierung von Handwaschpräparaten verwendet werden, können nun mit einem entsprechenden Gebinde bestückt werden.
Zu beachten: Pumpen Sie das Handwaschpräparat an.



Turnus der Aufbereitung und zusätzlich empfohlene Maßnahmen

Turnus der Aufbereitung:

- Die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert Koch-Institut (KRINKO) empfiehlt in ihrer aktuellsten Empfehlung, dass der Umfang und die Häufigkeit der Aufbereitung in den hauseigenen Hygieneplänen festzulegen sind. Laut der Kommission existiert bislang keine Evidenz zu den Aufbereitungsintervallen.²

Zusätzliche Maßnahmen:

- Sichtbare Verschmutzungen am Auslass durch eine Wischdesinfektion entfernen.
- Sichtbare Verschmutzungen am Spendergehäuse durch eine Wischdesinfektion entfernen.



² Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 2016, 59(9):1189-1220.